



# MANUAL DE USUARIO MODELO RAMBLA 1404SR & 1405SR



## ÍNDICE

<b>1. INTRODUCCIÓN</b>	<b>3</b>
<b>2. INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO</b>	<b>3</b>
<b>3. PREPARACIÓN DE LA SILLA DE RUEDAS PARA SU USO</b>	<b>4</b>
<b>4. PRECAUCIONES DE USO</b>	<b>6</b>
<b>5. MANTENIMIENTO Y AJUSTES A REALIZAR POR EL USUARIO</b>	<b>11</b>
<b>6. MODIFICACIONES DE LA SILLA DE RUEDAS</b>	<b>15</b>
<b>7. INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y RESTRICCIONES DE CIRCULACIÓN</b>	<b>15</b>
<b>8. REVISIÓN / MANTENIMIENTO</b>	<b>16</b>
<b>9. GARANTIA</b>	<b>16</b>

## 1. INTRODUCCIÓN

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de empezar a utilizar su nueva silla de ruedas RAMBLA. Contienen importantes indicaciones de seguridad y valiosos consejos para el uso correcto de la silla de ruedas.

También contienen información sobre la seguridad de funcionamiento, la seguridad vial y la conservación óptima del valor de su silla de ruedas.

Si tiene alguna duda o necesita información adicional, póngase en contacto con el distribuidor que le suministró la silla de ruedas.

En nuestra página web encontrará siempre la última versión del manual de usuario e información sobre su producto.

### SÍMBOLOS



#### ADVERTENCIA

Es obligatorio observar y cumplir las advertencias.

Le informan de circunstancias que podrían provocar lesiones y/o daños en la silla de ruedas o en el entorno si no se respetan las advertencias.



#### NOTA

Trucos y consejos para simplificar el uso de las funciones.

## 2. INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

La silla RAMBLA está fabricada en acero y ha sido diseñada para su utilización tanto en interiores como exteriores.

Antes de utilizar su silla, compruebe que todos los componentes están en buen estado. Se entrega completamente montada y embalada en una caja. Si es posible, conserve el embalaje para un posible almacenamiento posterior de la silla de ruedas.

### 2.1. COMPONENTES DE LA SILLA DE RUEDAS

1. Respaldo de nylon
2. Asiento de nylon
3. Sistema de frenos
4. Reposapiés, plataforma y cincha de sujeción
5. Ruedas delanteras
6. Ruedas traseras
7. Reposabrazos
8. Empuñaduras ergonómicas



## 2.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	1404SR	1405SR
Ancho asiento	41 / 43 / 45 / 47 cm	41 / 43 / 45 / 47 cm
Altura total	90 cm	90 cm
Ancho total	59 / 61 / 63 / 65 cm	56 / 58 / 60 / 62 cm
Ancho plegado	29 cm	29 cm
Largo total	101 cm	101 cm
Largo asiento	43 cm	43 cm
Altura asiento - suelo	49 cm	49 cm
Alto del respaldo	43 cm	43 cm
Peso	18,5 kg	16 kg
Peso máximo	125 kg	125 kg
Ruedas delanteras	200 mm macizas	200 mm macizas
Ruedas traseras	600 mm PU	300 mm PU

\*El fabricante se reserva el derecho a modificar las características sin previo aviso.



### NOTA

Todas las dimensiones tomadas en piezas textiles (por ejemplo, respaldo tapicería) deben entenderse con una tolerancia de +/- 1 cm.

## 2.3. CONTENIDO DE LA CAJA

La caja del producto contiene los siguientes productos:

- Silla de ruedas RAMBLA – 1 unidad
- Reposapiés – 1 par
- Instrucciones de uso – 1 unidad
- Llaves multiusos – 1 unidad

## 3. PREPARACIÓN DE LA SILLA DE RUEDAS PARA SU USO

A continuación, les mostramos información sobre cómo desplegar la silla de ruedas y prepararla para su uso. Antes de utilizar la silla de ruedas por primera vez, solo tiene que desplegarla, colocar los reposapiés.

### 3.1. INSTRUCCIONES DE PLEGADO Y DESPLEGADO

#### 3.1.1. DESPLEGADO DE LA SILLA DE RUEDAS

1. Incline ligeramente la silla de ruedas hacia un lado (1, fig. 2).
2. En el lado opuesto, presione el tubo del asiento hacia abajo hasta el tope (2, fig. 2).
3. Incline la silla de ruedas hacia atrás y colóquela en el suelo.
4. Compruebe si la silla de ruedas se ha desplegado completamente. Para ello, presione los tubos de ambos lados del asiento
5. Para terminar de abrirla, puede ayudarse de las manetas posteriores, si fuera necesario.



### 3.1.2. PLEGADO DE LA SILLA DE RUEDAS

1. Pliegue los reposapiés o retire los reposapiés. (Apartado 4.4)
2. Sujete los bordes delantero y trasero de la funda del asiento y tire de la funda hacia arriba por el centro (3, fig. 2). La silla de ruedas se plegará automáticamente.
3. Empuje hacia atrás el tapizado del respaldo al plegar la silla de ruedas.



#### PRECAUCIÓN

Una vez abierta la silla, es importante poner el freno de las ruedas, sobretodo antes de sentarse. Al incorporarse también es necesario poner el freno, para evitar que la silla se deslice y pueda causar algún daño al usuario.

### 3.2. FIJACIÓN DEL REPOSAPIÉS

1. Los reposapiés deben colocarse hacia afuera, introduciendo los dos pasadores en los agujeros 2 y 3 (vea imagen a continuación).
2. Una vez colocados, girar el reposapiés hacia su posición delantera, entonces debes apretar el gatillo de montaje/desmontaje hasta que se cierre con un "click".
3. Dispone de una cinta en cada plataforma del reposapiés para poder apoyar los pies (4).
4. Para desmontar los reposapiés tire del gatillo, gírelos reposapiés 90° hacia fuera y tire de ellos hacia arriba para sacarlos.



1. Gatillo de extracción
2. Agujero encaje 1
3. Agujero encaje 2
4. Cinta reposapiés
5. Regulador longitud reposapiés

Mediante el regulador de la longitud del reposapiés puede ajustar la distancia de las plataformas para adecuarlas a la necesidad del usuario. (véase el apartado 5.1)



#### PRECAUCIÓN

Los reposapiés deben quedar separados del suelo por lo menos 65 mm para evitar posibles caídas.

## 4. PRECAUCIONES DE USO

- Antes de usar la silla, es conveniente aprender las técnicas para levantarse, sentarse, realizar transferencias, subir y bajar rampas, escalones, etc. Puede ayudarse de este manual de instrucciones, pero es recomendable solicitar información a un profesional sanitario.
- No conduzca nunca la silla sólo sobre las ruedas traseras.
- No es recomendable inclinarse hacia delante (para atarse los zapatos, coger algo del suelo, ...), utilice aparatos especialmente diseñados para esta función. En caso de necesidad, mantenga la espalda apoyada en el respaldo, coloque las ruedas de delante rectas para alargar la base de la silla e inclínese poco a poco para no desequilibrar la silla.
- Respete siempre el peso máximo soportado de la silla de 125 kg dependiendo del tamaño del asiento, y asegúrese que el tamaño de la silla se adecua al usuario.
- Puede utilizarse en interiores y exteriores.
- Las personas que utilicen la silla de ruedas de forma autónoma deben ser física y mentalmente capaces de moverla y frenarla. El usuario debe tener suficiente visión para utilizar la silla de ruedas en espacios públicos y en la vía pública.
- Si la silla de ruedas es movida por un acompañante, éste debe ser físicamente capaz de empujar y frenar la silla de ruedas ocupada.
- La silla de ruedas no es adecuada para niños. No se utilizará para el transporte de más de una persona ni de carga.
- No baje o suba escaleras sin ayuda, ni haga movimientos bruscos.
- En la calle, circule siempre por aceras y arcenes, nunca por la carretera. Asegúrese que su presencia es visible para los conductores cuando cruce la calle. Siempre circule con precaución, respete el código de circulación.
- No corra riesgos innecesarios, no dude en solicitar la ayuda de otra persona para superar algún obstáculo.

### 4.1. SUBIR Y BAJAR DE LA SILLA DE RUEDAS

Las distintas minusvalías permiten una mayor o menor maniobrabilidad.

Para entrar y salir de la silla de ruedas con facilidad y seguridad, los siguientes consejos pueden ser útiles.



#### NOTA

Coloque la silla de ruedas hacia atrás contra una pared estable (fig. 5). De este modo, la silla no rodará sobre superficies lisas.

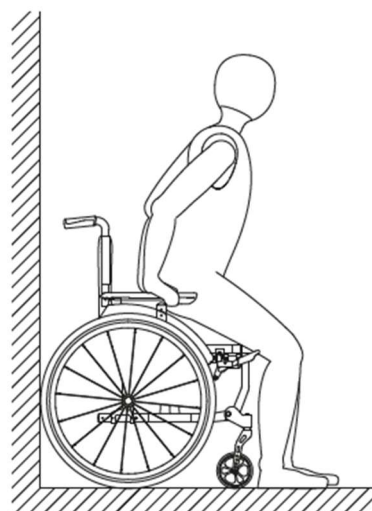


fig. 5



#### 4.1.1. COMO SENTARSE EN LA SILLA DE RUEDAS

1. Retire los reposapiés.
2. Si es posible, coloque las ruedas traseras de la silla de ruedas contra una pared sólida.
3. Accione los frenos de estacionamiento para bloquear la silla.
4. Colóquese lo más cerca posible de la silla de ruedas. Dese la vuelta y retroceda con cuidado hasta que sus piernas toquen el borde del asiento.
5. Agarre ahora el reposabrazos con las manos. Ahora puede sentarse lentamente y con seguridad.
6. Gire ambos reposapiés hacia delante en el sentido de la marcha. Escuche y sienta el clic para asegurarse de que los reposapiés están correctamente encajados.
7. Por último, abata ambos reposapiés hacia abajo con los pies y coloque los pies en los reposapiés (véase el apartado 3.2).

#### 4.1.2. COMO LEVANTARSE EN LA SILLA DE RUEDAS

Realice el procedimiento en el orden inverso.



#### **ADVERTENCIA**

No se apoye en los reposapiés ni en el estribo al levantarse o sentarse. No están diseñados para soportar todo el peso de una persona.


#### 4.1.3. TRANSFERENCIAS AUTÓNOMAS

Antes de realizar la transferencia, deberá abatir el reposabrazos (ver apartado 4.3) del extremo al que vaya a realizarse la transferencia.

Coloque la silla lo más cerca posible del lado en el que se vaya a realizar la transferencia, con las ruedas delanteras giradas hacia los lados, bloqueando el movimiento frontal de la silla.

Bloquee las ruedas para mayor seguridad y pliegue los reposapiés hacia fuera, o quítelos. Cambie el peso corporal al asiento/superficie donde vaya a transferirse.

Si tiene dificultades en la realización de transferencias, siempre recomendable usar una tabla de transferencia.

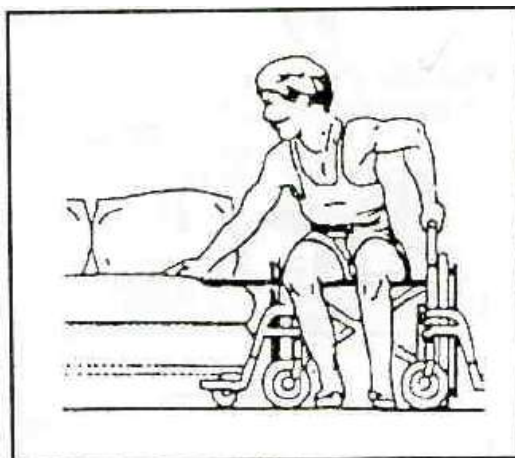

#### **ADVERTENCIA**

Antes de realizar la transferencia a la silla o fuera de ella, es muy importante que la distancia entre los elementos sea la mínima posible. Es importante que las ruedas delanteras miren en la dirección dónde se encuentre el objeto en el que vaya a transferirse.

#### 4.1.4. CÓMO SUBIR O BAJAR ESCALERAS



##### **PRECAUCIÓN**


No utilice escaleras mecánicas para mover una silla de ruedas ocupada entre una o más plantas.

Puede producir lesiones corporales graves.

Se aconseja extrema precaución cuando sea necesario mover una silla de ruedas para subir o bajar escaleras. Se recomienda ser ayudado por dos personas para poder hacer el movimiento.

Siga el siguiente procedimiento para subir las escaleras:

1. Inclinar la silla hasta el punto de equilibrio.
2. Colocar un ayudante en la parte frontal de la silla y otro en la parte trasera.
3. El ayudante que está en la parte trasera deberá inclinar la silla hacia atrás y apoyarla al escalón, agarrando las empuñaduras para hacer fuerza.
4. El ayudante que está en la parte frontal de la silla, agarrando la silla por la parte frontal (por la estructura, nunca por ninguna parte desmontable), deberá levantar la parte frontal de la silla.

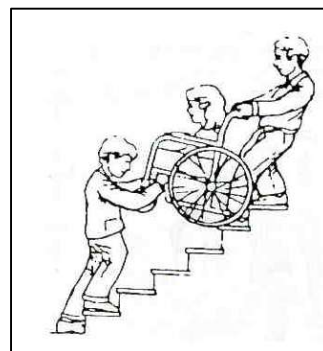


## 4.2. INCLINACIÓN DEL USUARIO EN LA SILLA

### 4.2.1. INCLINACIÓN HACIA ADELANTE

Cuando el usuario tenga la necesidad de doblarse o inclinarse hacia delante, es importante utilizar las ruedas delanteras como una herramienta para mantener la estabilidad y el equilibrio del usuario en la silla. Esta posición es esencial para su seguridad.

Para ello, será importante dirigir las ruedas delanteras para su movimiento hacia delante (en caso de ser necesaria una inclinación hacia esta dirección) y activar el bloqueo de las ruedas. Es importante no apoyarse en la parte delantera de los reposabrazos, pues desestabilizaría la silla.

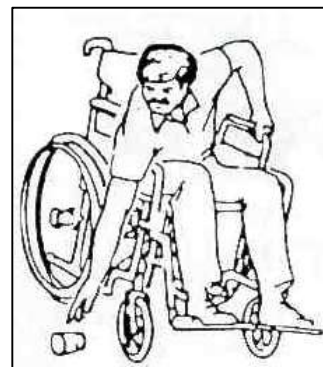

##### **PRECAUCIÓN**

No intente alcanzar objetos en ninguno de los siguientes casos:

1. Si esto implica que usted tiene que avanzar en el asiento.
2. Si usted tiene que recogerlos del suelo.

Ambos movimientos desestabilizarían el centro de gravedad de la silla y podría producirse un accidente.



### 4.3. PANELES LATERALES / REPOSABRAZOS

Los paneles laterales son abatibles para permitir a los usuarios subir o bajar de la silla de ruedas desde el lateral.

1. Presione el botón situado en la parte delantera del reposabrazos.
2. Sujete el panel lateral por el tubo situado delante del reposabrazos y levántalo hacia arriba/atrás.

Para volver a colocar el panel lateral, realice estas acciones en orden inverso. Asegúrese que el pin de bloqueo encaje, para confirmar que está bien fijado.



#### PRECAUCIÓN

Nunca transporte la silla cogida por el reposabrazos, ya que puede dañarlos o dañar la estructura de la silla.

Compruebe siempre antes de usar la silla que los reposabrazos están debidamente colocados.

### 4.4. PLEGADO DE LOS REPOSAPIÉS

1. Sujete el reposapiés por el borde delantero.
2. Gire el reposapiés hacia arriba. (fig. 8)



#### ADVERTENCIA

El usuario no debe apoyar su peso en los reposapiés al sentarse y levantarse de la silla de ruedas.

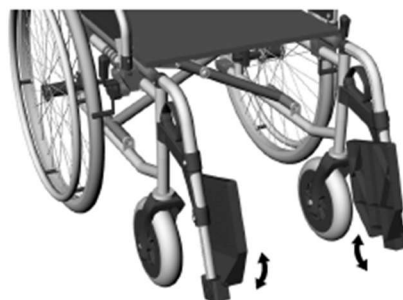


fig. 8

### 4.5. PROPULSAR Y FRENAR LA SILLA DE RUEDAS CON LAS LLANTAS DE EMPUJE (SOLO SILLA DE RUEDAS RAMBLA 1404SR)

La silla de ruedas se empuja y frena con los aros de empuje. Sujételos con las manos, con los pulgares hacia delante en los aros de empuje (véase la fig. 10).



#### ADVERTENCIA

Asegúrese de que sus pulgares no tocan la carcasa de la rueda mientras la silla está en movimiento.

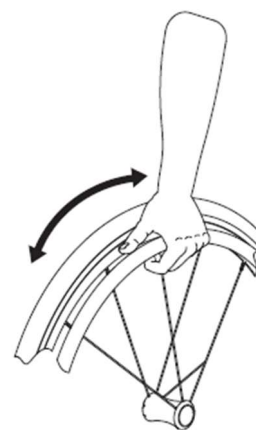


fig. 10

- **Para propulsar la silla de ruedas hacia delante:** Empuje ambas ruedas uniformemente hacia delante.

- **Para propulsar la silla hacia atrás:** Empuje ambas ruedas uniformemente hacia atrás.
- **Para detener la silla de ruedas:** Cierre las manos alrededor de los aros de empuje y aumente gradualmente la presión de agarre.
- **Para girar hacia un lado:** Desacelere la rueda del lado hacia el que desea girar.
- **Para girar la silla de ruedas sobre la marcha:** Empuje una rueda hacia delante y la otra hacia atrás al mismo tiempo.



#### ADVERTENCIA

Riesgo de atrapamiento: Entre el neumático y el apoyabrazos



#### ADVERTENCIA

Durante las maniobras de frenado brusco, las llantas de empuje pueden calentarse bastante.

## 4.6. CONDUCCIÓN EN PENDIENTES Y TERRENOS IRREGULARES

Los baches y las irregularidades del terreno pueden hacer que la silla de ruedas vuelque al pasar por rampas, pendientes, desniveles y bordillos.

Incline el cuerpo hacia delante al subir un escalón o una pendiente. (1 y 2, fig. 11).

Incline la parte superior del cuerpo hacia atrás al bajar pendientes y escalones. (3 y 4, fig. 11).



#### ADVERTENCIA

Suba o baje pendientes siempre en línea recta y a velocidad reducida. No conduzca oblicuamente por pendientes, ya que aumenta el riesgo de vuelco.



#### ADVERTENCIA

Si frena la silla de ruedas durante mucho tiempo utilizando los reposamanos, por ejemplo, al conducir cuesta abajo, se genera mucho calor por fricción. Utilice guantes adecuados.



fig. 11

## 4.7. CARGA DE LA SILLA DE RUEDAS

Se pueden colgar cargas adicionales (mochilas u objetos similares) de hasta 5 kg como máximo, siempre que no se supere el peso máximo del usuario.



#### ADVERTENCIA

Colgar cargas en la silla de ruedas aumenta el riesgo de que vuelque hacia atrás. Por ello, se recomienda utilizar soportes antivuelco.

La silla de ruedas dispone de un freno de estacionamiento de palanca” a cada lado. Pueden utilizarse para aparcarla con seguridad.

1. Presione la palanca de freno hacia delante de forma que el freno bloquee la rueda (1, fig. 12).
2. Presione la palanca de freno más hacia delante hasta que note que encaja (2, fig. 13).

Para soltar el freno de estacionamiento: Tire de la palanca de freno hacia atrás.

Los tornillos que unen los frenos a la estructura de la silla permiten ajustarlos según sus necesidades.



RAMBLA 1405SR



RAMBLA 1404SR

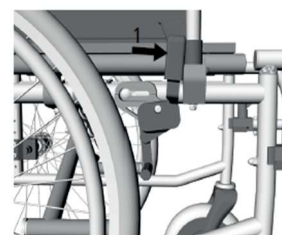


fig. 12

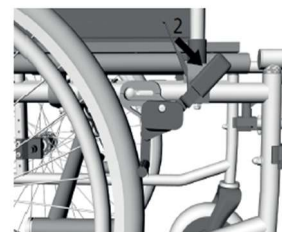


fig. 13



#### ADVERTENCIA

- No utilice los frenos de estacionamiento para detener la silla de ruedas durante el desplazamiento, ya que las ruedas podrían bloquearse. Debido al bloqueo inmediato de las ruedas, es posible que ya no pueda controlar el sentido de la marcha.
- Bloquee los frenos cuando se siente o levante de la silla. Los frenos no están diseñados para reducir la velocidad de la silla, solo son para impedir el movimiento de las ruedas traseras cuando está parada.
- Asegúrese que la rueda ha quedado sujeta en su acoplamiento antes de utilizar la silla. Si no es así podría salirse y causar una caída.



#### NOTA

Utilice ambos frenos de estacionamiento al aparcar la silla de ruedas. De este modo, la fuerza de frenado se distribuye uniformemente entre las dos ruedas traseras.

## 5. MANTENIMIENTO Y AJUSTES A REALIZAR POR EL USUARIO

A veces se necesitan accesorios para los ajustes que se describen a continuación. Sólo deben utilizarse accesorios originales de TEYDER, S.L. Sólo así se garantiza la conformidad y, por tanto, la seguridad del producto.

En la primera puesta en marcha de un nuevo usuario, todos los ajustes de la silla de ruedas deben ser realizados por especialistas cualificados para garantizar un posicionamiento correcto y la seguridad.



### ADVERTENCIA

Las tareas de ajuste complejas que pueden provocar un riesgo de accidente si no se realizan correctamente sólo deben ser realizadas por personal especializado designado y están etiquetadas en consecuencia. «Sólo debe realizarlas personal especializado».

Esto se aplica especialmente al ajuste de los frenos y a los ajustes que afectan a la estabilidad de la silla de ruedas.

## 5.1. AJUSTE DE LA LONGITUD DEL REPOSAPIÉS

Los ajustes deben realizarse individualmente y con el usuario sentado en la silla y apoyando los pies en las plataformas de los reposapiés.

Para ajustar el largo del reposapiés, recuerde que la distancia entre el suelo y la plataforma del reposapiés debe ser de al menos 6,5 centímetros dispone de 6 posiciones diferentes si quiere modificar su extensión:

1. Afloje la unión ubicada en el tubo del reposapiés entre el tubo y la plataforma, con tan solo abrir la palanca de la unión.
2. Aprete los dos seguros salientes por cada lado para poder mover el tubo del reposapiés y adaptarlo a la longitud que desee. Sujete el reposapiés y tire de él hacia abajo o empújelo hacia arriba hasta alcanzar la posición deseada, pero sin sobrepasar la etiqueta de máximo/mínimo.
3. Vuelva a apretar firmemente la unión de nuevo.
4. Compruebe si la longitud de la pata inferior está ajustada



### ADVERTENCIA

Es importante asegurar que, una vez ajustado el reposapiés, la altura e inclinación fijada no cause fricción entre la parte trasera de las piernas y la parte delantera de la tapicería del asiento. Es recomendable que la rodilla quede ligeramente por encima de la altura de la cadera.

## 5.2. FRENOS DE ESTACIONAMIENTO

**Sólo debe ser realizado por personal especializado:**

La distancia entre los pasadores de freno y la carcasa del neumático debe ser de 3-5 mm en el punto más estrecho cuando el mecanismo de freno está completamente abierto (1, fig. 28).

Afloje el tornillo para ajustar/corregir la distancia (2, fig. 28). A continuación, empuje los frenos hasta la posición correcta. Vuelva a apretar el tornillo y compruebe el funcionamiento de los frenos. Cuando los frenos están accionados, no debe ser posible empujar la silla de ruedas.

Si el freno se gasta o se daña, reemplazar todo el sistema de freno con urgencia.

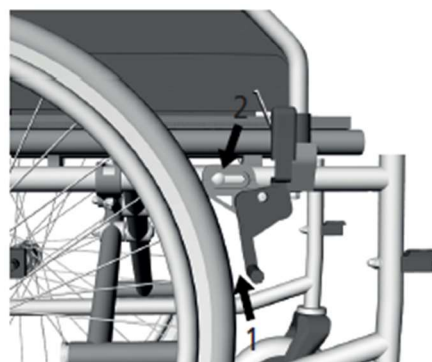


fig. 28



### 5.3. SOPORTE ANTIVUELCO

Las ruedas antivuelco de esta silla de ruedas son un accesorio opcional, no incluido en el producto.

El diseño de las ruedas antivuelco mejora la estabilidad de la silla de ruedas. Esto reduce la probabilidad de que la silla de ruedas vuelque durante el proceso de subida.

Para colocarlos retire las ayudas de inclinación de goma para insertar los soportes antivuelco fijables en el tubo inferior trasero de la estructura. Las ruedas de apoyo están fijadas al tubo metálico con un seguro saliente, que para poder extraer los antivuelcos debes apretarlo.



### 5.4. REPOSAPIÉS ELEVABLE

Para fijar el reposapiés a la silla de ruedas, proceda del mismo modo que con un reposapiés estándar (consulte el apartado 3.2).



#### ADVERTENCIA

**Riesgo de atrapamiento:** existe riesgo de atrapamiento en piezas móviles (por ejemplo, la almohadilla de la pantorrilla, la palanca de pivote).

**Riesgo de lesiones:** no se ponga de pie sobre el reposapiés ni transporte la silla de ruedas por los reposapiés. No están para soportar todo el peso de una persona.

#### Ajuste de la inclinación del reposapiés elevable

Presione hacia delante la palanca de desbloqueo del muelle neumático, para elevar el reposapiés, levante el mismo hasta la posición deseada. Deje de presionar cuando encuentre la posición adecuada, al soltar el reposapiés se quedará fijado en su posición.



### Ajuste de la longitud del reposapiés elevable

Para ajustar la longitud del reposapiés elevable, dispones de 4 posiciones diferentes si quieres modificar su extensión:

1. Afloje la unión ubicada en el tubo del reposapiés entre la almohadilla de la pantorrilla y la plataforma, con tan solo abrir la palanca de la unión.
2. Apriete los dos seguros salientes por cada lado para poder mover el tubo del reposapiés y adaptarlo a la longitud que desee. Sujete el reposapiés y tire de él hacia abajo o empujelo hacia arriba hasta alcanzar la posición deseada, pero sin sobrepasar la etiqueta de máximo/mínimo.
3. Vuelva a apretar firmemente la unión de nuevo.
4. Compruebe si la longitud de la pata inferior está ajustada.



### 5.5. COMPROBAR LA PRESIÓN DE LAS RUEDAS

En caso de ruedas neumáticas, asegúrese que la presión sea la adecuada. Es recomendable realizar una revisión semanal y mantener los neumáticos siempre en la presión correcta.

Las ruedas macizas deberían cambiarse siempre que empiecen a aflojarse de los bordes, cuando aparecen grietas o se quedan sin relieve.



#### ADVERTENCIA

Cambie inmediatamente cualquier parte que esté agrietada o dañada, como neumáticos, reposabrazos, crucetas, asiento, respaldo, etc.

### 5.6. LIMPIEZA

La estructura de la silla se puede limpiar con un abrillantador que no sea agresivo. Para limpiar la tela del asiento y el respaldo, utilizar una esponja humedecida en agua tibia y ayúdese de un jabón suave. Se recomienda usar un limpiador específico para nylon.



#### ADVERTENCIA

Para limpiar las partes metálicas, no utilizar productos abrasivos ni detergentes fuertes, ni se ayude de materiales que puedan rallar la estructura.

### 5.7. RUEDAS

Las ruedas deberían revisarse al menos una vez al mes para comprobar la tirantez hacia el eje de los radios. Si la rueda tambalea o está suelta, suelte la tuerca de seguridad y apriete el tornillo del eje ligeramente. Para comprobar que la rueda está correcta, apóyela sobre uno de los dos lados y haga girarla. Ésta debería dejar de girar de forma lenta. Si se para de forma abrupta, significa que está demasiado prieta y que el eje debería soltarse un poco.

Las ruedas delanteras están aseguradas por una horquilla, mediante una tuerca y un tornillo. Esta tuerca y tornillo deberían comprobarse periódicamente para permitir un giro cómodo pero seguro. Debajo de la tapa de la rueda hay una tuerca de ajuste. Si está demasiado prieta esta tuerca, será difícil de dirigir la silla, en cambio, si está demasiado floja, el movimiento no será firme y se balanceará la rueda.



Para comprobar que la rueda está correcta:

1. Inclina la silla hacia atrás.
2. Levante la rueda giratoria hacia el techo y luego empuje suavemente hacia abajo y a los lados. La rueda y la horquilla deberían girar sin obstáculos y frenar poco a poco.
3. Si la rueda se detiene en ángulo hacia un lado, aflojar la tuerca de seguridad de la horquilla y ligeramente presiónela.

### 5.8. CRUCETAS

Asegúrese que la tuerca y el tornillo que sujeta las crucetas se aprietan de tal forma que permite el plegado fácil de la silla de ruedas, pero no quedan sueltas.

Periódicamente lubricar el perno central. Esto asegurará a la silla de ruedas que se "flexiona" al cruzar superficies irregulares.



#### NOTA

Periódicamente lubricar el tornillo central.

## 6. MODIFICACIONES DE LA SILLA DE RUEDAS

El uso de piezas no subministradas por TEYDER, S.L. o cualquier modificación realizada sobre la silla puede dañar la estructura de la misma y crear condiciones de inseguridad, nunca cubiertas en garantía.

Si se instalan productos de terceros en la silla de ruedas, la responsabilidad de la seguridad del producto pasa a la persona que instala los accesorios o realiza la instalación.

La conformidad de la combinación de accesorios o complementos y producto es entonces nueva, y debe ser declarada por la persona que lo instala. La conformidad declarada por TEYDER según MDR 2017/745.

## 7. INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y RESTRICCIONES DE CIRCULACIÓN

Al utilizar la silla de ruedas, tenga siempre en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad para evitar caídas, situaciones de peligro y daños en la silla de ruedas:

- Antes de utilizar la silla de ruedas por primera vez, practique el desplazamiento sobre un terreno llano y bien terreno llano y bien delimitado. Familiarícese con el comportamiento de frenado y aceleración en línea recta y en las curvas. Se recomienda ir acompañado.
- No deje nunca a niños o adolescentes en la silla de ruedas sin supervisión.
- Bloquee siempre el freno antes de sentarse o levantarse de la silla de ruedas.
- No utilice nunca la silla de ruedas bajo la influencia del alcohol u otras sustancias que influyan en la atención o la receptividad física y mental.
- Tenga en cuenta que el riesgo de vuelco puede aumentar si se desplaza el equilibrio debido a movimientos corporales o a la colocación de cargas sobre la silla de ruedas. Ajustar la silla de ruedas a sus extremos aumenta el riesgo.
- Con una inclinación / pendiente de más de 10° existe un mayor riesgo de vuelco hacia delante o hacia atrás.
- Mantenga sus manos alejadas de las partes móviles de la silla como los reposapiés, reposabrazos, cruceta, entre otros, para evitar lesiones.

- Asegúrese de frenar la silla durante las transferencias.
- Tenga especial cuidado con los cambios de peso ocasionados por los movimientos corporales, pueden modificar el centro de gravedad aumentando así el riesgo de vuelco.
- No impulse su silla de ruedas hacia delante contra bordillos, cantos u otros obstáculos sin frenar.
- No salte de obstáculos (bordillos, escalones, etc.) estando sentado en la silla de ruedas.
- No se apoye en los reposapiés ni en el reposapiés al levantarse o sentarse.
- No supere nunca la carga máxima para el conductor y los objetos estibados, ya que podría provocar lesiones o daños en la silla.
- Cualquier incidente grave relacionado con el producto debe comunicarse al fabricante y a la autoridad responsable.

## 8. REVISIÓN / MANTENIMIENTO

Recomendamos realizar las inspecciones indicadas en el programa de mantenimiento a intervalos regulares para garantizar que la silla de ruedas sea siempre segura de usar.

Un cuidado y mantenimiento defectuosos o negligentes de la silla de ruedas limitan la responsabilidad.



### ADVERTENCIA

Para mantener la seguridad de funcionamiento de la silla de ruedas, las reparaciones sólo deben ser realizadas por talleres especializados y con piezas de repuesto originales TEYDER.

## 9. GARANTIA

Con el fin de garantizar los derechos de los clientes y proporcionar un servicio postventa de alta calidad, nuestra empresa ofrecerá piezas de repuesto gratuitas o servicio de garantía para los daños causados por problemas de calidad del producto, o problemas de los materiales que se produzcan durante el período de garantía. La garantía de la silla de ruedas manual se extiende a 3 años.

Si necesita una reparación, contacte con el distribuidor que se lo vendió, a través de él, le proporcionaremos el soporte necesario.

### 9.1. EXCLUSIONES A LA GARANTÍA

El servicio de garantía no cubre las siguientes situaciones, las reparaciones y el servicio relacionado deberán pagarse en consecuencia:

1. Superar el período de servicio especificado y el alcance estipulado en la Política de garantía postventa de los productos de Teyder.
2. Uso, funcionamiento o mantenimiento incorrectos de los productos de Teyder de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
3. Los daños derivados de la exposición al agua, de lluvia o al humo, la inmersión en hielo o nieve, o la corrosión causada por sustancias como productos farmacéuticos o químicos, así como los daños o averías causados por catástrofes naturales.
4. El desgaste normal no está cubierto por la garantía (neumáticos, frenos, tapizados, asientos y respaldos, ...) Averías o daños causados por fuerza mayor (incluidos, entre otros, terremotos, tifones, incendios, inundaciones, incidentes sociales, incidentes masivos, delitos violentos, etc.).

5. Las reparaciones, modificaciones, desmontaje o daños en el producto o en sus componentes que se hayan producido fuera de los centros de servicio autorizados para su silla de ruedas.
6. Daños en los componentes de la silla de ruedas que se hayan producido por el uso de piezas no originales o por modificaciones no autorizadas.
7. Mal funcionamiento del producto o daños causados por factores humanos como colisiones, caídas, sobrecarga o exceso de velocidad durante la conducción.
8. Ausencia de certificado de tres garantías o tarjeta de servicio postventa válidos, o números de serie de producto no coincidentes en las facturas de compra, certificados o tarjetas.
9. Alteración o modificación no autorizada de la fecha o período de reparación de tres garantías para la silla de ruedas y sus componentes.

La vida útil prevista del producto es de cinco años si se utiliza a diario y de la forma prevista. Esto supone el cumplimiento de las especificaciones de mantenimiento y seguridad estipuladas en este manual.

Nos reservamos el derecho a la interpretación final de este manual. Cualquier error de impresión o mejora del producto se incluirá en la nueva versión. Podemos lanzar nuevos productos para satisfacer la demanda del mercado en cualquier momento. En caso de discrepancias entre las descripciones funcionales y los indicadores de rendimiento pertinentes y el manual, prevalecerán las instrucciones específicas del producto y las instrucciones complementarias relacionadas.

Importado y distribuido por:

TEYDER, S.L.

Polígono Industrial Sant Antoni. Nau 5

08620 Sant Vicenç dels Horts

Barcelona

España

[www.teyder.com](http://www.teyder.com)

[teyder@teyder.com](mailto:teyder@teyder.com)

Por problemas técnicos contactar con [sat@teyder.com](mailto:sat@teyder.com)

El proveedor puede modificar las dimensiones sin previo aviso.



Fabricante:

Jiangsu Assure Medical Equipment Co., Ltd

Nº 799, Chugiao Road, Zhenjiang City,

Jiangsu Province, China

Representante CE:

SUNGO Europe B.V

Fascinatia Boulevard 522, Unit 1.7,

2909VA Capelle aan den, IJssel, The Netherlands

Notas:

